



Руководство по применению

Набор диагностический, варианты исполнения:

BASIC SET C10, BASIC SET C10/E10, BASIC SET C10/E15, BASIC SET C10/E16, EUROLIGHT C10/E10, EUROLIGHT F.O.30/E36, EUROLIGHT F.O.30/LED/E36, COMBILIGHT F.O.30/E30, COMBILIGHT F.O.30/E36, COMBILIGHT F.O.30 LED/E36, PICCOLIGHT C/E50, PICCOLIGHT C/E55, PICCOLIGHT F.O./E50, PICCOLIGHT F.O./E55, PICCOLIGHT F.O./E56, PICCOLIGHT F.O. LED/E56, с принадлежностями:

- 1) BASIC SET C10: Головка отоскопа COMBILIGHT C10; Рукоятка; 3 Многообразные ушные воронки (Ø2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм); Кронштейн осветителя, изогнутый; 2 Ларингеальных зеркала (Ø20 мм, 22 мм); Держатель шпателя; Назальная воронка; Запасная лампа; Жесткий кейс.
- 2) BASIC SET C 10/E 10: Головка отоскопа COMBILIGHT C 10; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E 10; Рукоятка; 3 Многообразные ушные воронки (Ø2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм); Кронштейн осветителя, изогнутый; 2 Ларингеальных зеркала (Ø20 мм, 22 мм); Держатель шпателя; Назальная воронка; Запасная лампа; Жесткий кейс.
- 3) BASIC SET C 10/E15: Головка отоскопа COMBILIGHT C 10; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E15; Рукоятка; 3 Многообразные ушные воронки (Ø2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм); Кронштейн осветителя, изогнутый; 2 Ларингеальных зеркала (Ø20 мм, 22 мм); Держатель шпателя; Назальная воронка; Запасная лампа; Жесткий кейс.
- 4) BASIC SET C 10/E16: Головка отоскопа COMBILIGHT C 10; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E16; Рукоятка; 3 Многообразные ушные воронки (Ø2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм); Кронштейн осветителя, изогнутый; 2 Ларингеальных зеркала (Ø20 мм, 22 мм); Держатель шпателя; Назальная воронка; Запасная лампа; Жесткий кейс.
- 5) EUROLIGHT C 10/E10: Головка отоскопа EUROLIGHT C10; Головка офтальмоскопа E 10; Рукоятка; Однообразные ушные воронки (10 x Ø2.5 мм, 10 x Ø4.0 мм); Сумка на молнии.
- 6) EUROLIGHT F.O.30/E36: Головка отоскопа EUROLIGHT F.O.30; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36; Рукоятка; Однообразные ушные воронки (10 x Ø2.5 мм, 10 x Ø4.0 мм); Жесткий кейс.
- 7) EUROLIGHT F.O.30 LED/E36: Головка отоскопа EUROLIGHT F.O.30 LED; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36; Рукоятка; Однообразные ушные воронки (10 x Ø2.5 мм, 10 x Ø4.0 мм); Жесткий кейс.
- 8) COMBILIGHT F.O.30/E30: Головка отоскопа COMBILIGHT F.O.30; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E30; Рукоятка; Однообразные ушные воронки (10 x Ø2.5 мм, 10 x Ø4.0 мм); Сумка на молнии.
- 9) COMBILIGHT F.O.30/E36: Головка отоскопа COMBILIGHT F.O.30; Головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36; Рукоятка; Однообразные ушные воронки (10 x Ø2.5 мм, 10 x Ø4.0 мм); Запасная ксеноновая лампа; Запасная галогеновая лампа; Назальный осветитель; Транслюминатор XL; Ларингеальное зеркало; Жесткий кейс.



ЗАО "Полтава", г. Казань,
По. Пискарев, д. 18
Тел.: (843) 570-55-02, 570-55-01
E-mail: poltava@yandex.ru
www.polta.ru



ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР

для сбора острого инструментария
и органических отходов (одноразовая)

КЛАСС Б (желтые)

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
РД № 609 2007/00917
ТУ 9396-009-7717574-2006

Исходящий ЛПУ _____

Код организации ЛПУ _____

Специальный код ЛПУ _____

Дата сбора _____

на _____

подпись ответственного лица _____

Little Doctor
STETHOSCOPE
СТЕТОСКОП

LD Prof-I



Компактный и легкий.
Большие диафрагма и колокол.
Ultra Lightweight.
Big Diaphragm and Big Open Bell.



Little Doctor
STETHOSCOPE
СТЕТОСКОП

LD Prof-I



Компактный и легкий.
Большие диафрагма и колокол.
Ultra Lightweight.
Big Diaphragm and Big Open Bell.



2-114 M

REPLACEABLE CUTTER

An ISO 9001: 2008 Certified Company

NULIFE

NEEDLE BURNER AND SYRINGE DESTROYER

NULIFE DOTS

DESTROY ON THE SPOT

323/01/52
yusuf nurhan
all



115
ksitex





Перечень вложений:

Таблица 1

п/п	Наименование	Кол-во
1	Комплект шин пневматических КШв-2 (рука, нога, насос)	1
2	Комплект шин пневматических КШд-2 (рука, нога, насос)	1
3	Косынка фиксации верхних конечностей	1
4	Фиксатор пояса верхних конечностей	1
5	Воротник Шанса взрослый, детский	1
6	Пакет охлаждающе-согревающий	1
7	Ножницы для разрезания повязок	1
8	Перчатки смотровые нестерильные	2
9	Лейкопластырь 2х500, 5х500	1
10	Бинт медицинский стерильный 7х14, 5х10	2
11	Носилки мягкие складные	1
12	Сумка	1
13	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	1
16	Салфетки стерильные марлевые №10	1

Свидетельство о приемке: Укладка травматологическая УТ-822н/5 в сумке тканевой каркасной медицинской признана годной к эксплуатации.

№ кофр: 307

Дата выпуска: 08.08.2022

Штамп ОТК:



АРИСМЕД
КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УПАКОВОК

+7 906 100 72 77

aris-med@mail.ru

www.aris-med.ru









ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Что нужно знать о СПИДе?

СПИД - абсолютно смертельное заболевание, против которого отсутствуют эффективные средства лечения и профилактики. СПИД передается при использовании нестерильных шприцев, уже бывших в употреблении (среди инъекционных наркоманов) или ранее инфицированными иглами, при половых сношениях с инфицированным партнером.



Курение представляет собой не только вид наркотической зависимости, оно является вредной психологической привычкой. Затягиваясь сигаретой, человек вводит в свой организм не только никотин, а целый "букет" опасных ядов (синильную кислоту, аммиак, мышьяк), которые приводят к дефициту кислорода в организме. Любители табака чаще страдают стенокардией и инфарктом миокарда. Риск заболеть раком у курильщиков в 10 раз выше, чем у остальных людей.



Наркотики пагубно действуют на любого человека, но наиболее опасны они для подростков. Человек, принимающий наркотики, очень быстро попадает в наркотическую зависимость, что сопровождается расстройством мышления и сознания, сменой функций некоторых внутренних органов и, в конечном итоге, деградацией личности. Очень скоро наступает страшный период, сопровождаемый головными болями, расстройством желудка, спазмами кишечника, приступами истерии, бессонницей. Человек не находит себе места и не владеет собой, в такие минуты наркоманы совершают преступления и самоубийства.



Помни, наркотики - это смерть!

Алкоголь - это зло, как для общества, так и для здоровья самого человека. Систематическое употребление спиртных напитков приводит к хроническому заболеванию - алкоголизму, проявляющемуся в физической и психической зависимости от алкоголя, психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, центральной нервной системы, что приводит к алкогольным психозам (частая форма - елая горячка).









+7 (499) 400-23-56

№119
Термо-Конт
МК®

www.termokont.ru



Thermometer medical glass

«ИМПЕХ-МЕД»

mercury

plastic case

Execution of TMP



Термометр соответствует
ГОСТ Р 31516-2012



Зарегистрирован в РОССИИ.
Поверен.



Внесён в Гос. реестр средств
измерений под № 48784-11

Термометр медицинский

максимальный стеклянный

«ИМПЭКС-МЕД»

ртутный

пластиковый футляр

Исполнение TMP



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/10572 от 21.09.2011 года.



Изготовитель : Wuxi Medical Instrument
Factory, No.86 Dongjie, Zhangjing, Xibei
Town, Wuxi City, Jiangsu 214194 China.



По заказу и под контролем «ИМПЭКС-МЕД»
РОССИЯ



Посиндромные укладки - 12 синдромов

Укладка состоит из перевязочных и лекарственных средств. Рассчитана на мушкетера, фалангидов, судорожных синдромов, нарушение терморегуляции и др.

Набор "Посиндромная укладка" включает в себя следующие материалы: 10 синдрома

Товары в Аптечке

№	Содержимое	Количество
1	Бинт марлевый мед. стерильный 5x10 см мед. 30	1 шт.
2	Бинт марлевый мед. ватный 5x10 см мед. 30	1 шт.
3	Бинт марлевый мед. стерильный 5x7 см мед. 30	1 шт.
4	Бинт марлевый мед. ватный 5x7 см мед. 30	1 шт.
5	Бинт марлевый мед. стерильный 7x14 см мед. 30	1 шт.
6	Бинт марлевый мед. ватный 7x14 см мед. 30	1 шт.
7	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
8	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
9	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
10	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
11	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
12	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
13	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
14	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
15	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
16	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
17	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
18	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
19	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.
20	Бинт марлевый мед. ватный 10x10 см мед. 30	1 шт.



БИНТ 7 м x 14 см
марлевый из нетканого материала
с неосложняющейся кромкой
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ 5 м x 10 см
марлевый
медицинский
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
Количество: 10

Ever's Life
марлевый медицинский
5 м x 10 см







ТРИВЕС



ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ИАДМ-«ТРИВЕС-ПЧЗ-М»







**Устройство-спиротест цифровое скринингового определения
жизненной емкости легких и объема первого секундного
форсированного выдоха портативное УСПЦ-01.**

Руководство по эксплуатации











КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ!

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ТАБАКОКУРЕНИЕ – вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде курения сигарет, сигар, сигарилл, курительных трубок или кальяна.

В современном обществе курение является распространенной привычкой среди различных групп населения, в том числе среди женщин, подростков и даже детей. Согласно статистическим данным, людей, регулярно употребляющих табак, в мире насчитывается около миллиарда. Никотиновая зависимость представляет серьезную опасность для организма человека. В то же время осознание вреда табака является действенной мотивацией, помогающей преодолеть тягу.



КАКИЕ ВЕЩЕСТВА СОДЕРЖАТСЯ В СИГАРЕТНОМ ДЫМЕ

СИГАРЕТА – это далеко не безобидная игрушка, состоящая из листьев табака и бумаги. При ее горении выделяется свыше 4 тысяч опасных химических веществ. Именно они и наносят основной вред организму при курении.

Вместе с дымом от сигареты вы вдыхаете:

СМОЛЫ – смесь твердых частиц. Большинство из них являются канцерогенами и оседают в легких;

МЫШЬЯК – самый вредный химических элемент в составе сигарет. Оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцирует развитие раковых опухолей;

БЕНЗОЛ – токсическое химическое соединение органического происхождения. Вызывает лейкоз и другие формы рака;

ПОЛОНИЙ – радиоактивный элемент. Оказывает радиационное воздействие на организм курильщика;

ФОРМАЛЬДЕГИД – токсичное химическое вещество. Вызывает заболевания легких и дыхательных путей;

Другие вещества – вдыхаемые с табачным дымом вредные соединения, через кровеносную систему проходят по всему организму человека, нанося серьезный ущерб внутренним органам.



ЧТОБЫ НЕ БРОСАТЬ КУРИТЬ, НЕ НАЧИНАЙ

ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Курение является одной из главных причин развития многих летальных заболеваний. Согласно статистике ВОЗ ежегодно от него умирает около 6 млн людей по всему миру. Опасность курения невозможно переоценить. При поступлении в организм табачного дыма нарушается проведение нервных импульсов, которые ответственны за состояние большинства органов и систем. Последствием курения становится формирование множественных патологий.

Разрушающее влияние курения на организм любого человека заключается в его способности вызывать:

ТУБЕРКУЛЕЗ, РАК ЛЕГКИХ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ, ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ, АСТМА, ИМПОТЕНЦИЯ, БЕСПЛОДИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.



СТАРИКАЯ КОЖА И МОРЩИНЫ

ГНИЛЫЕ ЗУБЫ И ЗАПАХ ИЗ РТА



ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ И ЗДОРОВЬЕМ В ОБЩЕМ

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ БЕРЕМЕННОСТИ

Слово «мама» всегда прочно ассоциируется с заботой, любовью и прочими самыми лучшими вещами на нашей земле.

Однако курящие женщины вольно или невольно калечат

оставьте ребёнку шанс!



НЕ НАЧИНАЙ!

КУРЕНИЕ - ЭТО ПРИВЫЧКА, ПРОТИВНАЯ ЗРЕНИЮ, НЕВЫНОСИМАЯ ДЛЯ ОБОНЯНИЯ, ВРЕДНАЯ ДЛЯ МОЗГА, ОПАСНАЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ.



КУРЕНИЕ С СПОРТ НЕСОВМЕСТИМЫ!



ВЛИЯНИЕ НА РОСТ МЫШЦ

Курение нарушает кислородный обмен в организме, а недостаток кислорода напрямую вредит работе сердечно-сосудистой системы и росту мышц. Негативно сказывается как то, что курильщики имеют меньший объем легких, так и то, что никотин и прочие химические вещества сигарет существенно уменьшают активность кровотока.

УХУЖДЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА

Научные исследования говорят о том, что регулярное курение меняет метаболизм человека на клеточном уровне, ухудшает процессы синтеза мышечного белка и повышает активность генов, вызывающих саркопению – возрастную потерю мышечной массы. Говоря простыми словами, тело курильщика в буквальном смысле стареет быстрее.

ВРЕД ДЛЯ СЕРДЦА

В среднем, сердце курильщика бьется на 30% быстрее, что повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему при выполнении силовых и кардио упражнений. Суммарно это выражается в снижении силовых показателей и повышении утомляемости. Поскольку легкие и дыхательная система работают менее эффективно, появляется хроническая отдышка, в результате чего нагрузка на сердце усиливается еще больше.

УТОМЛЯЕМОСТЬ И СТРЕСС

На смену кратковременному расслаблению, вызванного выкурением сигареты, спустя уже пять-семь минут проходит стресс, провоцируемый отсутствием «бодящего» никотина – в конечном итоге курение выматывает нервную систему. Кроме этого, появляется общая утомляемость, и курящему человеку начинает казаться, что он просто не хочет двигаться.

Самая главная ловушка курения состоит в том, что разрушающее действие сигарет проявляется постепенно – человек не замечает, как с каждым днем его организм работает намного хуже и хуже.



Лучшая система
по спасению жизни

Сконструировано с максимальным
учётом требований эргономики!
Эргономичная конструкция делает
из устройства лучший медицинский
аппарат в мире!



ShineBall®

Лучшее решение в сфере
медицинского обеспечения

Устройство
реанимационное для
ручной вентиляции
легких ShineBall

Инновационность

Эргономичность

Технологичность



126-1

ShineBall®

RESUSCITATOR

The Best Solution to Medical Arrangement.



Устройство реанимационное для
ручной вентиляции легких

ShineBall: ENT-1003 PVC

Размер: для детей

Сделано в Тайване. Китайская республика

Изделие
ОДНОРАЗОВОЕ.
После использования
подлежит утилизации.

Supreme Human-engineered

Ergonomically designed proving
better medical performance. ENT Kit
available in different sizes and types.
Quality material shaped providing
high durability and flexibility, compatible
with worldwide standard for ICU, OR and ER.



АРИСМЕД


ООО «Арис-Мед»
452680, РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 1
Тел. +7 (963) 900-42-00
www.aris-med.ru aris-med@mail.ru

УТ-822н/5 Укладка травматологическая

(Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения
РФ от 05.11.2013 г. №822н) ТУ 21.20.24-001-24478858-2021

Дата изготовления:

08.08.2022

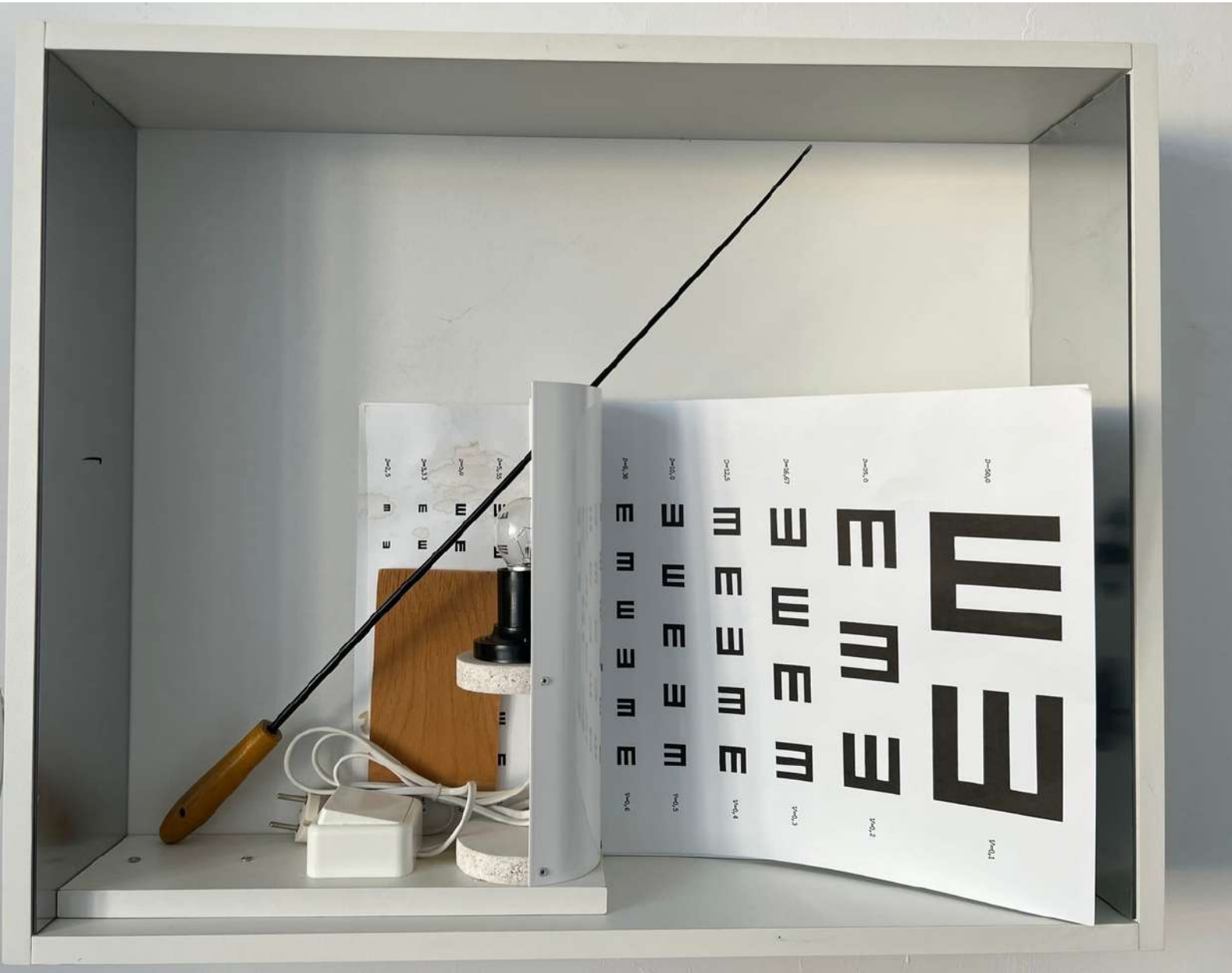









ОМЕЛОН В-2

323/01/51



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ



Артериального
давления



Частоты пульса



Индикация уровня
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Для анализа уровня глюкозы в крови
ЗАБОР КРОВИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Уровень глюкозы в крови определяется в
процессе измерения артериального давления

Комплексная упаковка



ChoiceMMed

Fingertip Pulse Oximeter

PORTABLE NON-INVASIVE OXIMETER



- Light & Compact Design
- Quick Measure
- Easy Operate & Carry
- Automatically Power Off
- Low Power Consumption

ChoiceMMed







САЛФЕТКА
профессиональные дезинфицирующие с антисептиком, спиртом, хлором (СДС-В-М)
3 60x60 см
стерильно 1 шт.

БИНТ
11/2-93
стерильный
5м x 10см
1 штука

САЛФЕТКИ
Марлевые медицинские
16 x 14 см
стерильные
десять двухслойных салфеток

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Верофарм
2 x 500 см

Бата
Хирургическая перчатка стерильная
по ГОСТ 5556-81
25 г.











ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ SUYUN 1шт.

Length/Длина: 1100±30mm

DEHP free

EN ISO13485:2016

СанПиН 2.1.7.2790-10 (класс Б)

STERILE EO

CE 0123



- ❖ Стерилизовано оксидом этилена. Стерильный, одноразовый.
- ❖ Нетоксично. Апиrogenно.
- ❖ Только для однократного применения.
- ❖ Не применять при нарушении целостности пакета.
- ❖ Хранить при комнатной температуре.
- ❖ После использования утилизировать.

Открывать
здесь

Метки от дистального конца расположены на расстоянии:

1-ая-40см 2-ая-45см 3-ья-50см 4-ая-55см 5-ая-60см

Stom 16-110

Size/Размер: 16FR/CH

Производитель: Цзянсу СУЙУН Медикал Материалс Ко., Лтд., Китай,
Jiangsu SUYUN Medical Materials Co., LTD.
No. 1 Medicine Lane, Renmin Rd., 222002 Lianyungang, People's Republic of China
Tel.: 86-518-85476682, 85608151 fax: 86-518-85450398, 85466033
e-mail: export@suyunmedical.com

LOT Партия/LOT:

Дата изготовления/MFG:

Срок годности/EXP:

Уполномоченный Представитель в РФ: ООО "Юникормед"
Санкт-Петербург, ул. Мельничная 18/А
т/ф.: 702-33-04, info@unicmed.ru, www.unicmed.ru
ру № ФСЗ 2010/07113 от 23.11.2018



UNICORN MED



расходные медицинские материалы

UNICORN MED

Зонды медицинские:
аспирационные, желудочные, питательные
Зонд желудочный O.D. 6,7 мм, длиной 1100 мм,
с рентгеноконтрастной полосой - 1 шт.

Art/REF: ИЮН020

Размер: FR/CH 20

Размеры зонда: - 440±2 см
34±0,2 см, 44±0,2 см, 74 ±0,2 см от
дистального конца

STERILE EO



CE 0197

ISO9001 & EN46001



см. инструкцию на групповой упаковке

Назначение: используется для аспирации желудочного и кишечного содержимого и забора проб из желудка.
Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.
Не использовать при повреждении упаковки. Не использовать после истечения срока годности. После использования изделие утилизировать.

Производитель: Цзянсу Суейун Медикал Материалс Ко., Лтд., Сопотан роуд, Шенган Таун, Хайнань, Китай. Р/Ф №ФСЗ 2011/07113 от 23.11.2018
Уполномоченный представитель: ООО «Юникормед», 120719, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д.18, литера А, тел.: (812) 702-33-04, e-mail: info@unicmed.ru



2 012042 00021

Срок годности 2.1.2.20

расходные медицинские материалы

UNICORN MED

Зонды медицинские:
аспирационные, желудочные, питательные
Зонд желудочный O.D. 6,0 мм, длиной 1100 мм,
с рентгеноконтрастной полосой - 1 шт.

Art/REF: ИЮН021

Размер: FR/CH 21

Размеры зонда: - 440±2 см
34 ±0,2 см, 44±0,2 см, 74 ±0,2 см от
дистального конца

STERILE EO



CE 0197

ISO9001 & EN46001



см. инструкцию на групповой упаковке

Назначение: используется для аспирации желудочного и кишечного содержимого и забора проб из желудка.
Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.
Не использовать при повреждении упаковки. Не использовать после истечения срока годности. После использования изделие утилизировать.

Производитель: Цзянсу Суейун Медикал Материалс Ко., Лтд., Сопотан роуд, Шенган Таун, Хайнань, Китай. Р/Ф №ФСЗ 2011/07113 от 23.11.2018
Уполномоченный представитель: ООО «Юникормед», 120719, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д.18, литера А, тел.: (812) 702-33-04, e-mail: info@unicmed.ru



2 012042 000205

Срок годности 2.1.2.20

10 лет
БЕСПЛАТНОЕ
сервисное обслуживание

Clinically Tested
BHS A/A - BHS Protocol

Прибор одобрен Британским
Гипертоническим Обществом

24792



**Диагностика
аритмии**

Прибор для измерения артериального
давления и частоты пульса Для дороги и
дома



- Высокая точность
- Память на 30 измерений
- Компактный и портативный

BP A90



microlife

Derrcom®



Non-contact
Infrared
Thermometer

Model: JXB-178



СПЕЛТЕХСБЫТ

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

FIRST AID KIT

323/01/53

«NIKSU»

**СВЕТИЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ YD01-II
ОДНОРЕФЛЕКТОРНЫЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Qualified Certificate

Products name:
Cold Light Operating Lamp

Model: YD01- II

Date: Aug.2016

Checker: (8)











EPSON

Continued use of the product when the ink level is below the line on the tank
could damage the product.
Hypochlorite, peroxide, acid, grease, solvent, and other corrosive substances
on plastic, metal, and other parts are strictly prohibited in use.
Do not use water, alcohol, or other liquids to clean the scanner.
Use a soft, dry cloth to clean the scanner.
For more information, please refer to the user manual.
Epson is not responsible for any damage caused by the use of the product.
Epson is not responsible for any damage caused by the use of the product.







НАРКОМАНИЯ - ПУТЬ В НИКУДА!

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

НАРКОМАНИЯ - это нарушение психики, заключающееся в сильном желании принять определенное вещество, входящее в перечень запрещенных препаратов, в ущерб другим видам деятельности, и упорное продолжение использования этого вещества, несмотря на пагубные последствия. Злоупотребление препаратами, не входящими в вышеупомянутый перечень, называется токсикоманией.

Сегодня проблема наркомании охватывает все больше и больше человек.



Наркомания - худшая из любых болезней, самая ужасная из всех смертей. Она подобно вирусу, поражает все области человеческой жизни: физическую, психическую и социальную.



ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

1. Бесплатное предложение попробовать наркотики.
2. Из любопытства.
3. Не осознает пагубности и вредности привычки, реакция на которую в 15-20 раз выше, чем алкоголь.
4. Низкая самооценка.
5. Стремление уйти от тоски и одиночества.



НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - это непреодолимая потребность человека в приёме наркотика.

ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не больше десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, употребляющие наркотики, умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества.

Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.



Человек, страдающий наркоманией, очень быстро теряет способность к воспроизводству потомства. У

У НАРКОМАНОВ НЕТ БУДУЩЕГО



ДО

ПОСЛЕ

Среднестатистический срок жизни наркоманов - 6 лет, в большинстве случаев они умирают от передозировки.

Спустя 3 года после употребления наркотиков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества....
Статья 228.1 УК РФ



**ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ!
ВЫБИРАЙ ПУТЬ, ГДЕ
НАРКОТИКОВ НЕТ!**



ДЕЛАЙ ВЫБОР САМ

ОТКАЗАВШИСЬ От НАРКОТИКОВ, ТЫ:

- Сбережешь свое здоровье;
- Сохранишь своих друзей и близких;
- Не причинишь боль своей семье;
- Останешься свободным и независимым.



Ведь ты разумный человек. Хорошо воспитан. У тебя есть цель в жизни. Ты знаешь, чего хочешь и как это получить. Так что если тебе нужна жизнь без наркотиков - просто не пробуй. Не испытывай ни свою волю, ни свое здоровье. Не играй в игру, в которой не бывает победителей.



CITIZEN

RELIABLE
CALCULATORS

RELIABLE
CALCULATORS

CITIZEN

JUST CALCULATE
CMB1201-BK



12
DIGIT

M



RELIABLE
CALCULATORS

CITIZEN

JUST CALCULATE
CMB1201-BK



12
DIGIT

M



CITIZEN

2POWER

12DIGIT CMB1201-BK



Прибор для измерения артериального
давления и частоты пульса Для дороги и
дома



BP A90



Возьми с собой в дорогу



Простое управление



Память на 30 измерений



Индикация заряда батарей



Возможность использования аккумуляторных
батарей

microlife

